

OPPO GENU X – GEZIELTE ENTLASTUNG UND KOMPRESSION

Die OPPO GENU X ist eine Soft-orthese zur gezielten Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments des Kniegelenks, die ihre Wirkung genau dann erzeugt, wenn es medizinisch notwendig ist.

DAS WIRKPRINZIP – KURZ ERKLÄRT

ENTLASTUNG

Der intelligente Mechanismus entlastet das betroffene Kompartiment bei einer Kniestreckung zwischen 0° und 25°. Dabei wird das entlastende Moment sanft über Gurte oberhalb und unterhalb des Knies eingeleitet und vermeidet so unmittelbaren Druck auf das betroffene Gelenk.

MUSKELSTIMULATION

Das sanft komprimierende 3D Gestrick unterstützt propriozeptiv die natürliche Muskelstabilität und die Reduktion von Schwellungen.


TRAGEKOMFORT

Das 3D Gestrick mit eingebauter Flexzone an der Patella in Verbindung mit der anatomisch geformten Schiene erhöht den Tragekomfort und den passgenauen Sitz, auch bei höherer Aktivität.



HMV Nr. 23.04.04.0007


DIE OPPO GENU X – BESONDERE EIGENSCHAFTEN

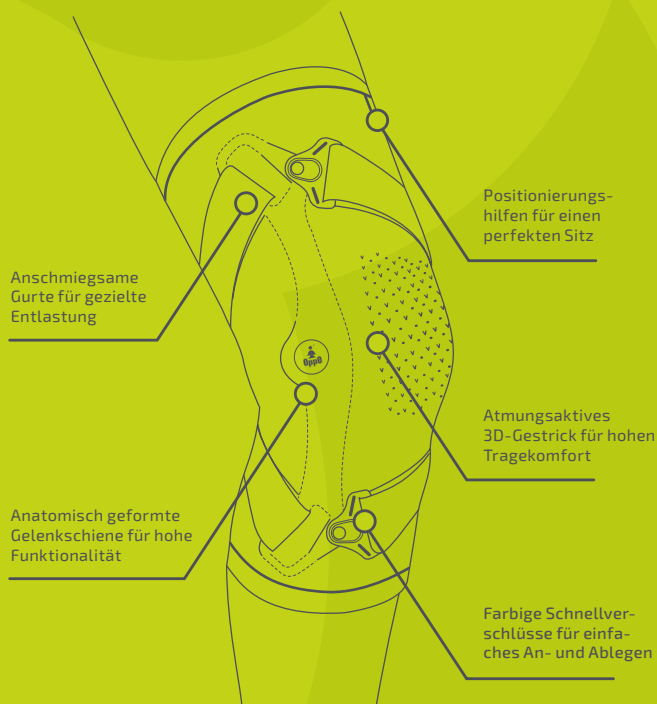

INDIKATIONEN

- › leichte bis moderate unikompartmentelle Gonarthrose
- › Degenerative Meniskusläsionen
- › Knorpel-Knochenläsionen
- › andere Kniebeschwerden, bei denen eine unikompartmentelle Entlastung sinnvoll ist

STANDARD UND COMFORT GRÖSSEN – FÜR HOHE PASSFORM

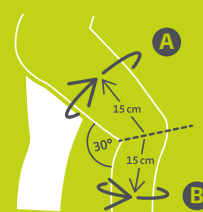

BESTELLINFORMATIONEN OPPO GENU X – MEDIALE ENTLASTUNG

	STANDARD	STANDARD	COMFORT	COMFORT
Größe	medial rechts	medial links	medial rechts	medial links
XS	101K100011R2	101K100011L2		
S	101K100011R3	101K100011L3	101K100012R3	101K100012L3
M	101K100011R4	101K100011L4	101K100012R4	101K100012L4
L	101K100011R5	101K100011L5	101K100012R5	101K100012L5
XL	101K100011R6	101K100011L6	101K100012R6	101K100012L6
XXL	101K100011R7	101K100011L7	101K100012R7	101K100012L7
XXXL	101K100011R8	101K100011L8	101K100012R8	101K100012L8

	STANDARD	COMFORT	
Größe	Umfang A Oberschenkel	Umfang A Oberschenkel	Umfang B Unterschenkel
XS	38 – 41		27 – 30
S	41 – 44	44 – 47	30 – 33
M	44 – 47	47 – 50	33 – 36
L	47 – 50	50 – 53	36 – 39
XL	50 – 53	53 – 56	39 – 42
XXL	53 – 56	56 – 59	42 – 45
XXXL	56 – 59	59 – 62	45 – 48

Maße in cm



einfach. sicher. aktiv.

Für uns muss eine Orthese einfach in der Handhabung sein, sicher den Schmerz lindern und dafür sorgen, dass Sie wieder aktiv am Leben teilhaben können.

veomedical.de

veomedical® GmbH · Enzianweg 8 · 50259 Pulheim
hallo@veomedical.de